


シールライト

術野が変わる、手術が変わる

LED の鮮明な光が見えないストレスを軽減
術野に集中でき、安全な手術をサポートします。

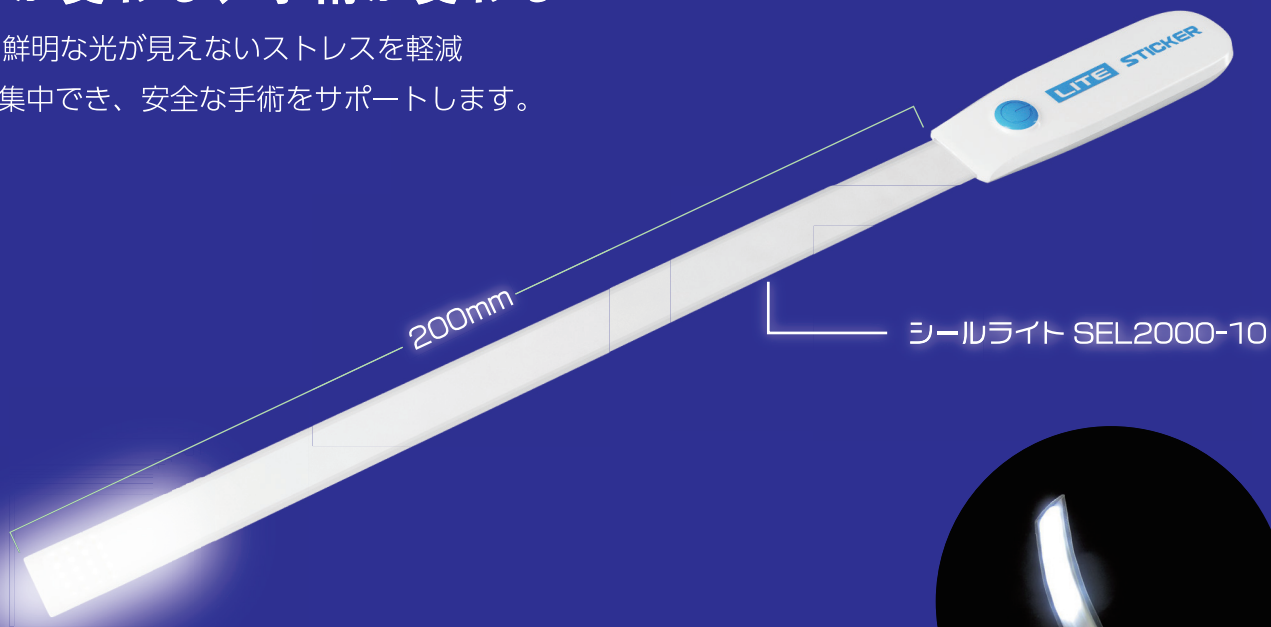


シールライト SEL2000-10



Features

- コードレス
- スポット点灯
- 器具への貼付け可能
- 低温度
- 曲げられる
- 自然な色合い
- 事前準備不要
- 連続使用時間 40 分

シールライト未使用時

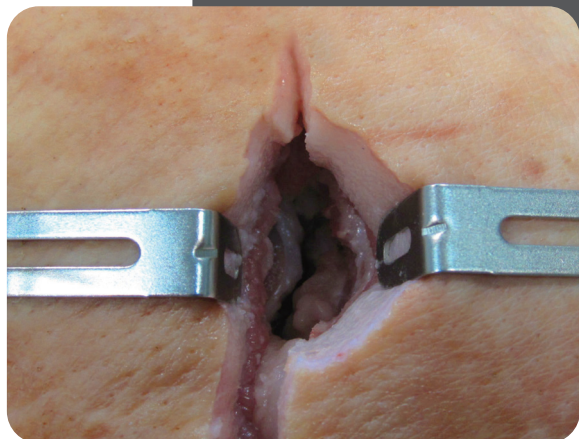


シールライト使用時



■使用方法

1. 本製品を無菌操作で滅菌パックから取り出す。
2. ストラップ裏面の両面テープを剥がす。(図1)
3. 使用する器具に合わせてストラップを曲げてリトラクターなどに貼り付け固定する。(図2)
4. 本体のスイッチボタンを押して電源を入れる。(図3)
5. 電源を切る場合は、再度本体のスイッチボタンを押す。

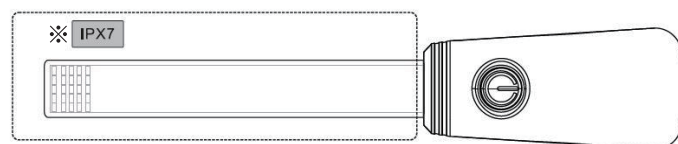


※ストラップ部の水に対する保護等級



(図1)



(図2)

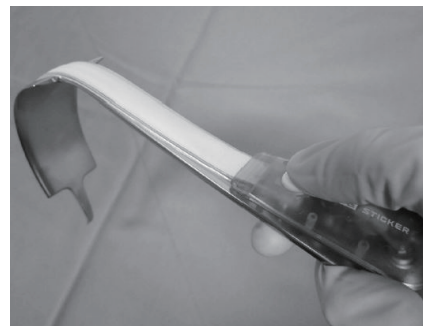

(図3)


■形状・仕様

- ・ストラップ長：200mm
- ・電源：LR44 アルカリボタン電池 x 6 個 (DC3V) (電池交換不可)

※本製品は、滅菌済み単回使用製品であり、一度開封したものや、一度使用したものを再滅菌、再使用しないこと。

シールライト

品番 SEL2000-10
価格 ¥85,000 (税抜)
入数 1箱(10個)

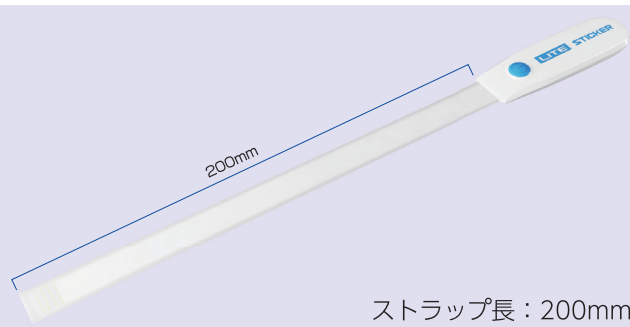

ストラップ長：200mm

医療機器届出番号：27B1X00031000006

●製造販売元



株式会社ellman-Japan
〒550-0003 大阪府大阪市西区京町堀1-8-33
TEL:06-6448-2511 FAX:06-6448-2522

●製造元

Donngguan Kaiser Technology Co., Ltd.