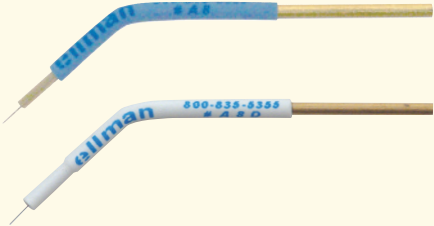
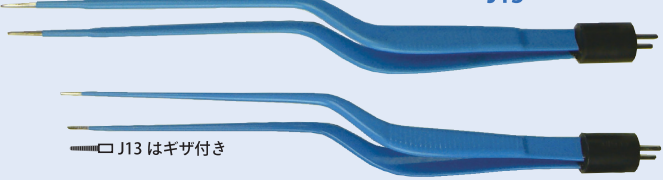
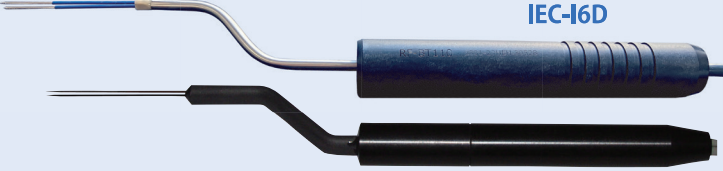


耳鼻咽喉科：早見表

	電極の形状	モード	出力目安値	使用例
切開	 ワイヤー形状の電極 例：TA8 A8D	CUT	低め 15 . . . 標準 20 . . . 高め 25	鼻粘膜切開
		BLEND	低め 20 . . . 標準 25 . . . 高め 30	
切除	 ループ形状の ロング電極 例：RF-RL110-4	BLEND	低め 25 . . . 標準 35 . . . 高め 40	鼻茸切除
凝固	 ボール形状の ロング電極 例：RF-BE110-4	COAG	低め 15 . . . 標準 20 . . . 高め 30	鼻出血 下鼻甲介粘膜凝固
	 チューブ形状の 吸引電極 例：RF-SC110	COAG	低め 15 . . . 標準 20 . . . 高め 40	鼻出血 鼻科手術 アデノイド手術
	 鑷子形状の電極 例：J7 J13 □ J13 はギザ付き	BIPOLAR	低め 5 . . . 標準 10 . . . 高め 20	鼻出血 鼻科・頭頸部手術
	 双極探針形状の電極 例：RF-BT110 IEC-I6D	BIPOLAR	低め 10 . . . 標準 15 . . . 高め 20	下鼻甲介粘膜凝固

※出力設定は目安となります。切開・凝固時の組織の変化を見ながら調整してください。

動画

耳鼻咽喉科動画



資料

参考テキスト



