
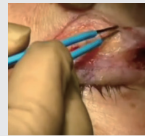


	電極の形状	モード	出力目安値	使用例	
切開		CUT	低め 13 . . . 標準 15 . . . 高め 20	皮膚切開 眼瞼下垂 内反症 腫瘍切除	
		BLEND	低め 18 . . . 標準 20 . . . 高め 25		
	※凝固の場合COAG:8~10推奨				
		CUT	低め 7 . . . 標準 9 . . . 高め 15	皮膚切開 隆起性腫瘍切除 翼状片切除	
BLEND		低め 8 . . . 標準 10 . . . 高め 15			
切除		BLEND	低め 13 . . . 標準 15 . . . 高め 20	隆起性腫瘍切除	
凝固		BIPOLAR	低め 1 . . . 標準 2 . . . 高め 5	バイポーラ凝固 止血	
		COAG	低め 8 . . . 標準 10 . . . 高め 15	結膜弛緩症の 凝固収縮	
		COAG	低め 15 . . . 標準 20 . . . 高め 30	涙嚢鼻腔吻合術鼻内法 (EN-DCR)の 鼻腔粘膜凝固	
		COAG	低め 20 . . . 標準 30 . . . 高め 40		
		COAG	低め 1 . . . 標準 2 . . . 高め 5	睫毛乱生	
※通電しながら刺入してください。					

※出力設定は目安となります。切開・凝固時の組織の変化を見ながら調整してください。

動画

眼科動画

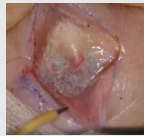

資料

参考テキスト

